

## IB sprayudstyr - rygsprøjte

### Før brug

- Tanken skylles med rent vand og spray-dysen aktiveres.
- Tjek at dysen er den rigtige til IB vaccination (rød) og korrekt monteret

### Efter brug

- Kyllingestøv tørres straks af de udvendige overflader med en fugtig klud
- Tanken skylles indvendigt med rent koldt vand - aktiver spray-dysen så denne også skylles godt igennem
- Dysen skilles ad og delene skylles med rent koldt vand
- Lad delene tørre godt inden de samles igen
- Lad altid tanken stå åben for at den tørrer godt
- Opbevar udstyret med tanken åben i et tørt, støvfrit rum, og ikke i direkte sollys

Det anbefales generelt at man aldrig bruger desinfektionsmidler i rygsprøjte udstyr.



Hvilken dyse, du skal bruge, afhænger af, hvad du skal vaccinere for.